

FD 366 sensitive wipes

Дезинфекция чувствительных поверхностей



Салфетки FD 366 sensitive wipes предназначены для быстрой дезинфекции и очистки чувствительных поверхностей медицинских изделий, таких как обивки оборудования и оснащения из пластмасс и кожзаменителя, поверхностей из оргстекла, полимеризационных ламп, крышек и панелей приборов, смесительных сосудов (в т.ч. для вакуумных смесителей), креплений и держателей для шлангов, плевательниц, панелей управления, машин для проявления рентгеновских пленок XR, турбин, а также рукояток и угловых наконечников и т.д. перед их последующей обработкой. Салфетки FD 366 sensitive wipes отличаются очень хорошей совместимостью с материалами. Дезинфицированные поверхности быстро сохнут.

Состав: 100 г раствора содержат 17 г 1-пропанола, 0,25 г алкилбензилдиметиламмония хлорида 50 %, вспомогательные вещества и воду.

Спектр действия: бактерицидное, туберкулоцидное, левуроцидное, ограниченно вируцидное (капсулированные вирусы, например, Vaccinia, в т.ч. вирусы гепатита В, гепатита С и ВИЧ¹⁾), а также безоболочечные вирусы типа Нору-вирусов). Занесен в список VАН. Испытано в соответствии со стандартами EN 14348, EN 14476.

1) Согласно рекомендации RKI (Bundesgesundheitsbl. 47, 62-66, 2004).

Применение: вынуть одну салфетку FD 366 sensitive wipes, протереть дезинфицируемые поверхности и предметы и оставить препарат для воздействия. Время воздействия согласно рекомендации VАН – 1 минута (см. таблицу в разделе DE). Дополнительные указания - см. информацию о продукте на нашем сайте.

Примечания: Турбины, рукоятки и угловые наконечники дезинфицировать снаружи перед предписанной обработкой согласно указаниям производителя. Перед обработкой чувствительных поверхностей проверить совместимость материалов на незаметном месте.

Внимание. Вызывает сильное раздражение глаз. Носить защитные перчатки и защитные очки/маску. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: в течение нескольких минут осторожно промыть глаза водой. При наличии контактных линз, по возможности, снять их. Продолжить промывать глаза. Хранить емкость плотно закрытой в хорошо проветриваемом месте. Подавать содержимое/емкость в качестве специального вида отходов.

CE 0297